Оценка результатов анализа для исследуемых образцов

Резул	пътат по уровню флуоресцен	щии		
Канал FAM (RHD-1, RHD-2, RHD-3)	Канал FAM (GAPDH)	Канал FAM (Резус- положительная контрольная ДНК (ПКО) RHD-1, RHD-2, RHD-3)	Результат	Примечание
RHD 3 из 3 <u>Выше</u> порогового значения	<u>Выше</u> порогового значения	<u>Выше</u> порогового значения	ДНК гена резус-фактора обнаружена	В пробе выявлена ДНК гена резус-фактора
RHD 2 из 3 <u>Выше</u> порогового значения	Выше порогового значения	Выше порогового значения	ДНК гена резус-фактора обнаружена	В пробе выявлена ДНК гена резус-фактора
RHD 1 из 3 <u>Выше</u> порогового значения	Выше порогового значения	Выше порогового значения	Сомнительный	Проба требует повторного тестирования
RHD 3 из 3 <u>Ниже</u> порогового значения	Выше порогового значения, чем ПКО на 2 и более циклов	Выше порогового значения	ДНК гена резус-фактора не обнаружена	В пробе не выявлена ДНК гена резус-фактора
_	<u>Ниже</u> порогового значения	-	Невалидный	Проба требует повторного выделения и тестирования
_	_	<u>Ниже</u> порогового значения	_	Допущены ошибки при проведении реакции или набор непригоден для использования

Результаты для контролей различных этапов ПЦР-исследования

Контроль	Этап	Сигнал по каналу FAM	Результат
Деионизованная вода	ПЦР	<u>Ниже</u> порогового значения	«ОК»
		Выше порогового значения	Контаминация геномной ДНК или продуктами ПЦР