

В портале введена возможность автоматического заполнения теста, для этого нужно следующим образом называть образцы при запуске программы на приборе:

N_XXXXX

N_YYYYY - образцы XXXX и YYYYY, пробирки нормы

M_XXXXX M_XXXXX M_XXXXX

M_YYYYY M_YYYYY M_YYYYY - образцы XXXX и YYYYY, пробирки L858R

D_XXXXX D_XXXXX D_XXXXX

D_YYYYY D_YYYYY D_YYYYY - образцы XXXX и YYYYY, пробирки делеций

T_XXXXX T_XXXXX T_XXXXX

T_YYYYY T_YYYYY T_YYYYY - образцы XXXX и YYYYY, пробирки T790M

0.5% 0.5% 0.5% -ПКО

5% 5% 5%- ПКО

K- K- K- K- - отрицательные контроли

Буквы должны быть латинские, идентификаторы образцов после подчеркивания совпадать у одного образца. Если алгоритм какие-то пробирки не распознает, их придется дорасставить вручную.

Пример правильного файла в приложении (для RotorGene).

Пробирки одного образца должны отличаться только начальной буквой.

Тест автоматически заполняется в момент выбора «EGFR-плазма» в списке тестов.